


プレミアム 1day コンタクトレンズ

# MyDay<sup>®</sup>

マイデイ<sup>®</sup>

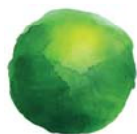

CooperVision<sup>®</sup>

あなたの毎日を素敵に彩る5つのメリット。

高い保水力  
含水率  
**54%**

だから、レンズが  
うるおって  
長時間乾きにくい。

酸素透過率  
当社従来比

約**4倍**<sup>※2</sup>

だから、  
瞳の健康に大切な  
酸素たっぷり<sup>※2</sup>。

**世界初**  
の技術が生んだ  
やわらかさ

だから、  
いままでより、  
つけ心地やさしく  
やわらか<sup>※1</sup>。

**紫外線  
カット  
機能**<sup>※3</sup>

薄くてもレンズの形が  
保たれて表裏も  
わかりやすく、  
取扱いがカンタン。

目に有害と  
いわれている  
紫外線A波85%、  
B波96%カット。

**取扱い  
カンタン**

※1 装着感には、個人差があります。

※2 当社従来品(ハイドロゲルレンズ)の約4倍の酸素透過率(近視・遠視用レンズ酸素透過率Dk/t=100 / 乱視用レンズ酸素透過率Dk/t=80)

※3 UV吸収剤を配合したコンタクトレンズは、UV吸収サングラスの代わりにはなりません。



## MyDay<sup>®</sup>

マイデイ<sup>®</sup>

近視・遠視用



## MyDay<sup>®</sup> toric

マイデイ<sup>®</sup> トーリック

乱視用

# MyDay®のはずし方

MyDay®は、表面がつるつるしてははずしにくいことがあります。  
正しいはずし方でしっかりはずしましょう。




- ① 鏡を見て、レンズが黒目についていることを確認します。

※レンズをはずす前に、指先の水気をしっかり乾燥させてください。



- ② 少しあごを引き、上目づかいで鏡を見るようにします。

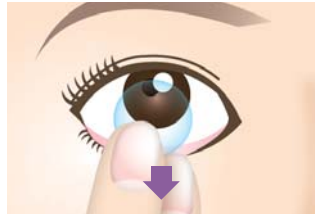

- ③ 利き手の中指で下瞼を引き下げ、人差し指でレンズを白目まで引き下げます。



- ④ 引き下げたレンズを人差し指と親指でしっかりつまんではずします。



※レンズをつまむときには、人差し指と親指の腹を軽くくっつけて、レンズをしっかりつまむようにしてください。

※レンズがはずれにくい場合は、人工涙液などを点眼して、目とレンズをうるおしてから再度お試しください。

コンタクトレンズは目に直接装着する高度管理医療機器です。必ず眼科医の検査、処方を受けてお求めください。

- レンズの使用期間(1日)を超えた装用は絶対にしないでください。●一度目からははずしたら、絶対に再使用しないでください。
- 装用時間を正しくお守りください。●取り扱い方法を守り、正しくお使いください。●定期検査は必ず受けてください。
- 少しでも異常を感じたら直ちに眼科医の検査を必ず受けてください。●破損などの不具合があるレンズは絶対に使用しないでください。
- 添付文書は必ずお読みください。

販売名: マイデイ

承認番号: 22700BZX00320000

製造販売元: クーパービジョン・ジャパン株式会社

製品についてのお問い合わせ先

0120-132-410

月～金曜日 9:00～17:00 (祝日は休み)

[www.coopervision.jp](http://www.coopervision.jp)

\*コンタクトレンズの装用ともなう目の症状などについては、必ず処方された眼科・クリニックにご相談ください。



資料のダウンロードは  
こちらから